

## Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von INFRATRONIC SOLUTIONS entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel umfasst das Portfolio noch viele weitere Hygieneprodukte. Angefangen bei unseren berührungslosen **Hygienespendern**, die zu fast allen Euroflaschen kompatibel sind, ohne dass das Mittel umgefüllt werden muss, bis hin zu kompletten **Hygieneschränken**, die Sie jederzeit mit wenigen Handgriffen an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können. Unsere Hygieneinnovationen sind durch die berührungslose Anwendung zu 100% hygienisch und entsprechen den heutigen Richtlinien des Robert Koch Institutes (RKI).

Unsere komplette Produktpalette finden Sie in unserem aktuellen INFRATRONIC SOLUTIONS Katalog, den Sie über Ihr Dental Depot oder Ihren Fachhändler anfordern können. Selbstverständlich erhalten Sie den Katalog auch direkt über unser Bestellformular auf [infratronic.de](http://infratronic.de).

## Hinweise und Beratung

Weitergehende Hinweise oder Beratung über die Handhabung erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Reklamationen oder Ersatzteillieferungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte halten Sie dafür Artikelbezeichnung, Kaufdatum und ggf. Seriennummer bereit, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung/ Reklamationsabwicklung gewährleistet werden kann. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen vor, die der Produktverbesserung dienen.



Art.Nr. 815000  
KEIMARME FLASCHENBELÜFTUNG  
mit PTFE Membranen Filter

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### 1. Das System

Unsere Hygienespender sind sogenannte „luftdicht geschlossene Über-Kopf-Systeme“. Das Mittel wird somit nicht durch eine Lanze nach draußen gepumpt, sondern das Mittel läuft in der natürlichen Flussrichtung nach unten und wird über die Universal Schlauchdosierpumpe in gleichbleibender Menge ausgegeben. Somit entfällt auch der Aufwand der Wiederaufbereitung mittelführender Bauteile des Spendersystems.

### 2. Das Problem

Die Verbrauchsmittel werden nicht alle in einheitlichen Flaschen abgefüllt. Manche Gebindeflaschen sind weich, andere wiederum sind etwas fester. Die weichen Flaschen ziehen sich, durch das bei der Entnahme entstehende Vakuum, einfach zusammen. Festere Flaschen halten dem Unterdruck nicht immer Stand und können ggf. reißen.

### 3. Die Lösung

Den entstehenden Unterdruck kann man durch manuelle Belüftung der Flasche beheben. Hierfür nimmt man die Flasche aus dem Spendersystem und dreht die Universal Schlauchdosierpumpe kurz vom Gebinde runter. Anschließend dreht man sie wieder auf das Gebinde drauf und positioniert die Flasche im Spendersystem.

Das manuelle Belüften können Sie umgehen, indem Sie unsere keimarme Flaschenbelüftung verwenden. Diese lässt immer so viel Luft in die Flasche, wie Verbrauchsmittel entnommen wird. Somit kann sich die Flasche nicht mehr zusammenziehen.

## ANWENDUNG

### 1. Desinfizieren Sie die einzustechende Fläche

Desinfizieren Sie zuerst die Fläche am Flaschenboden, in welche die keimarme Flaschenbelüftung eingestochen werden soll und halten Sie die Einwirkzeit von 15-30 Sekunden (je nach Verbrauchsmittel) ein.

### 2. Einsetzen der keimarmen Flaschenbelüftung

Positionieren Sie das Gebinde im Spendersystem und legen Sie die Universal Schlauchdosierpumpe ordnungsgemäß ein.

**VORSICHT VERLETZUNGSGEFAHR - bitte vorsichtig arbeiten da die Kanüle sehr scharfkantig ist!**



Anschließend stechen Sie die Spitze der keimarmen Flaschenbelüftung in den nach oben ragenden Flaschenboden, in die Rundung bzw. in die die Ecken, da dort produktionstechnisch das Material dünner ist und das Einstechen somit leichter geht.

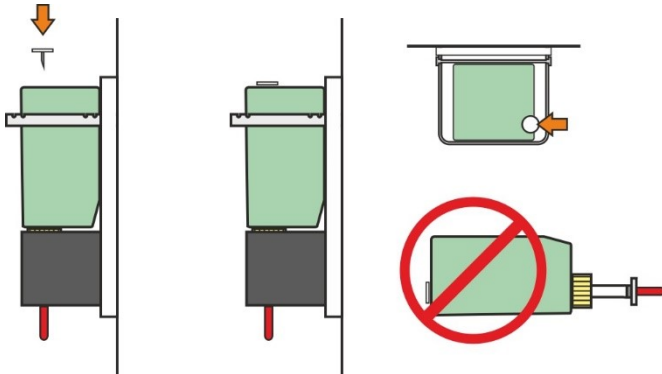


Abb. 5.13-2: Positionierung der keimarmen Flaschenbelüftung

Drücken Sie die keimarme Flaschenbelüftung bis zum Anschlag in das Gebinde. Bitte beachten: die keimarme Flaschenbelüftung ist so zu positionieren, dass sich das Spendergehäuse schließen lässt.

**Bitte achten Sie darauf, dass das Gebinde nach dem Einstechen der keimarmen Flaschenbelüftung nicht mehr gedreht oder gelegt wird** (außer wenn die Verbrauchsmittelflasche leer ist).

## HINWEISE

### 1. Verwendung

Die keimarme Flaschenbelüftung wird bei den INFRATRONIC SOLUTIONS Soft Systemflaschen nicht benötigt!

Eine Verwendung in Nachfüllbehältern ist NICHT erlaubt.

### 2. Handhabung

Bitte achten Sie darauf, dass das Gebinde nach dem Einstechen der keimarmen Flaschenbelüftung nicht mehr aus dem Spendersystem genommen wird (außer zum Flaschenwechsel).

Wenn Sie die Flasche dennoch aus dem Spendersystem nehmen und umdrehen oder auf die Seite legen, läuft das Mittel durch das Einstichloch in die Flaschenbelüftung und verklebt sofort die dort eingelegte Filtermembrane. In diesem Fall erfüllt die keimarme Flaschenbelüftung nicht mehr ihren Zweck, da die verklebte Filtermembrane (auch wenn dies augenscheinlich nicht zu erkennen ist) keine Luft in das Gebinde lässt.

### 3. Wechselintervall

Die keimarme Flaschenbelüftung stellt ein Verbrauchsmaterial dar, welches variablem Verschleiß, je nach Alkoholanteil des jeweiligen Desinfektionsmittels und Häufigkeit der Spenderauslösungen.

Bei ordnungsgemäßer Handhabung können diese mehrfach verwendet werden. Jedoch empfehlen wir einen kompletten Tausch im nachfolgenden Intervall:

- Desinfektionsmittel einmal pro Jahr
- Seife zweimal pro Jahr

## WARTUNG, SERVICE

Der Artikel ist wartungsfrei und unterliegt keinem Serviceintervall. Bei Problemen und Fragen zum Produkt steht Ihnen die

**SERVICE-HOTLINE 049 (06029) 99 303 0**

zur Verfügung.

## HERSTELLERINFORMATIONEN

Weinmann GmbH  
INFRATRONIC-SOLUTIONS  
Frankenstrasse 6  
D-63776 Moembris  
Deutschland / Germany

Fon: +49 (06029) 99 303 0  
Fax: +49 (06029) 99 303 29

eMail [infratronic@weinmann.gmbh](mailto:infratronic@weinmann.gmbh)  
Web [infratronic.de](http://infratronic.de)

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beachtung der Bedienungsanleitung ist Grundvoraussetzung für einen zuverlässigen Betrieb des Produkts und für die Erreichung der angegebenen Produkteigenschaften. Für den Fall von Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, besteht für daraus resultierende Schäden, gleich welcher Art, keine Haftung. Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Weinmann GmbH.

**STAND 05/2020**, durch die neue Anleitung erlöschen die vorherigen Anleitungen kommentarlos.

