

ANLEITUNG Flaschenwechsel

Spender IT 1000 AW EURO-2 und IT 500 AW EURO-2

1 ■ Es ist empfohlen bei der Aufbereitung von Spendern und Pumpen Handschuhe zu tragen.
(In Anlehnung an die TRBA 250, Punkt 4)




2 ■ Gerät öffnen und ggf. Anhaftungen an der Auslassdüse entfernen und desinfizieren*. Kontaminationsschutz der Spenderrückwand entnehmen und auf die Auslassdüse der Schlauchdosierpumpe stecken. * Bei Seife



3 ■ Leeres Gebinde inkl. Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung herausnehmen.



4 ■ PAK mit Ein- und Ausdrehhilfe vom leeren Gebinde drehen und direkt auf neues Gebinde schrauben.

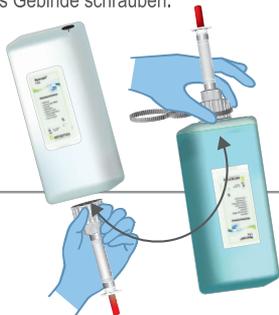


5 ■ Kontaminationsschutz entfernen, Schlauchdosierpumpe über dem Waschbecken entlüften und Kontaminationsschutz wieder aufstecken.



6 ■ Gebinde mit Kontaminationsschutz im Spender platzieren und Sichtprüfung auf Dichtheit durchführen.



7 ■ Einstichstelle der keimarmen Flaschenbelüftung auf dem Flaschenboden mit Desinfektion desinfizieren.

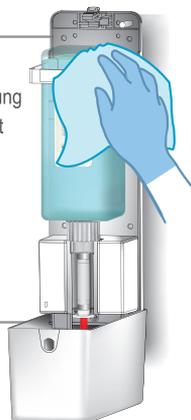

8 ■ Keimarme Flaschenbelüftung aus dem leeren Gebinde herausziehen und in eine der vorderen, äußersten Ecken des Flaschenbodens einstecken.



9 ■ Spender schließen, Kontaminationsschutz von der Auslassdüse ziehen und auf dem Pin der Spenderrückwand oben rechts stecken.



INFRATRONIC SOLUTIONS Herstellerempfehlung:
 ➔ Bei Desinfektion einmal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung wechseln.
 ➔ Bei Seife zweimal pro Jahr die Pumpen-Adapter-Kombination und keimarme Flaschenbelüftung tauschen.

