

Inhaltsverzeichnis

Features.....	1
1. Datenauslagerungsfunktion	2
2. Lock-Mechanismus während dem Update / Datenauslagerung / Reorganisation	6
3. Namensanpassung Lieferant zu Standard-Lieferant.....	6
4. Produktreport: Sortierung nach Nr.....	7
5. Produktreport: Doppelklick auf Produkt öffnet das Produkt in der Produktverwaltung.....	7
6. Spracheinstellung RU deaktiviert	7
7. Icon Lagerbestände und Packlisten ausgeblendet.....	7
8.Überarbeitung der Module Datenreorganisation und Update Datenreorganisation:	8
9. Deaktivierung von Log Dateien	9
Bugfixes	9


Features

1. Datenauslagerungsfunktion nun verfügbar
2. Lock-Mechanismus während des Updates/Datenauslagerung/Reorganisation
3. Miele XKM3200 Lan Modul wird unterstützt
4. Namenanpassung Lieferant zu Standard-Lieferant
5. Produktreport: Sortierung nach Produktnummern nun möglich
6. Produktreport: Schnellzugriff auf das Produkt durch Doppelklick auf den Produktnamen möglich
7. Spracheinstellung „Russisch“ wurde entfernt
8. Menüleiste: Icon für Lagerbestände und Packlisten sind nun ausgeblendet
9. Datenreorganisation und Updatemodul wurden verbessert
10. DOCma® Touch: Deaktivierung der LOG-Files möglich in den Optionen von Touch


1. Datenauslagerungsfunktion

1.1 Datensicherung


In der Regel sichert der Server über Nacht den gesamten Inhalt der Server Festplatten und somit auch den DOCma® Ordner. Fragen Sie hierzu Ihren Administrator. Optional bietet DOCma® die Möglichkeit eine Datensicherung durchzuführen.

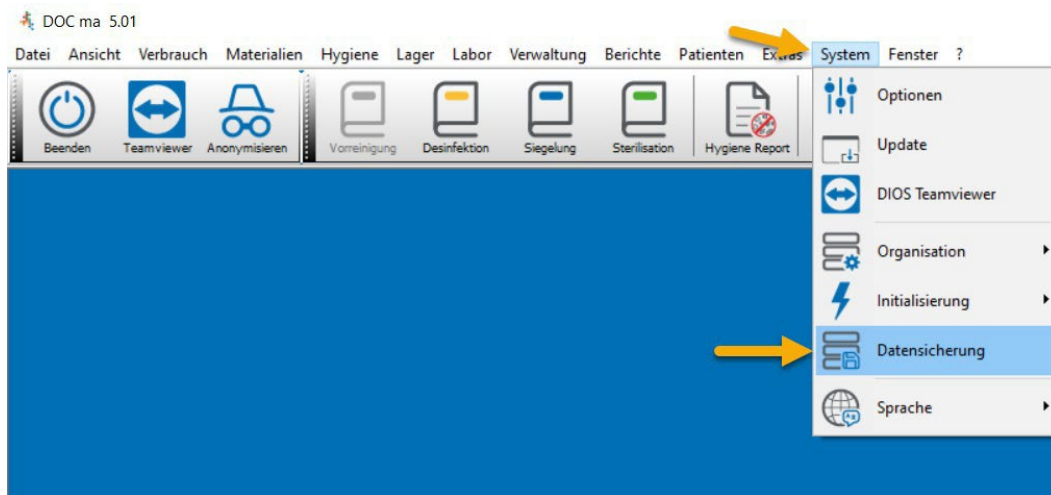

Entfernen Sie im Schritt 1 die Default Vorgaben der Datensicherung. Nutzen die den Button in Schritt 2, um den gesamten DOCma® Ordner für die Datensicherung auszuwählen.

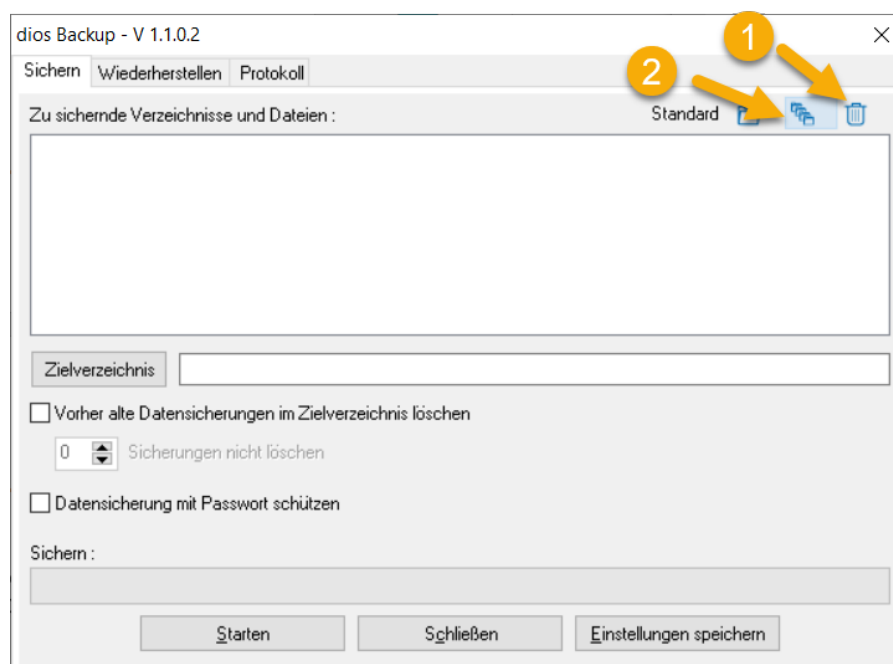

Wählen Sie das Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf Starten.

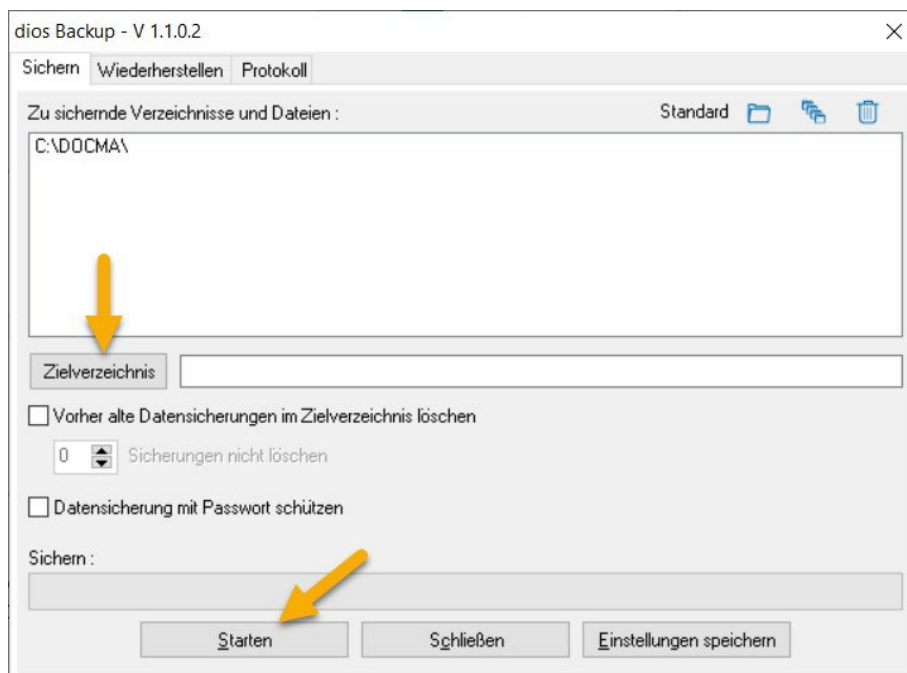



Starten Sie DOCma® im Anschluss der Datensicherung neu.

DOCma Version 5.01 -Changelog

1.2 Datenauslagerung


Starten Sie die Datenauslagerung wie hier beschrieben und wählen Sie den Zeitraum bis zu welchem Datum die Daten ausgelagert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf Starten.

Während der Auslagerung darf niemand mit der Software arbeiten!!!

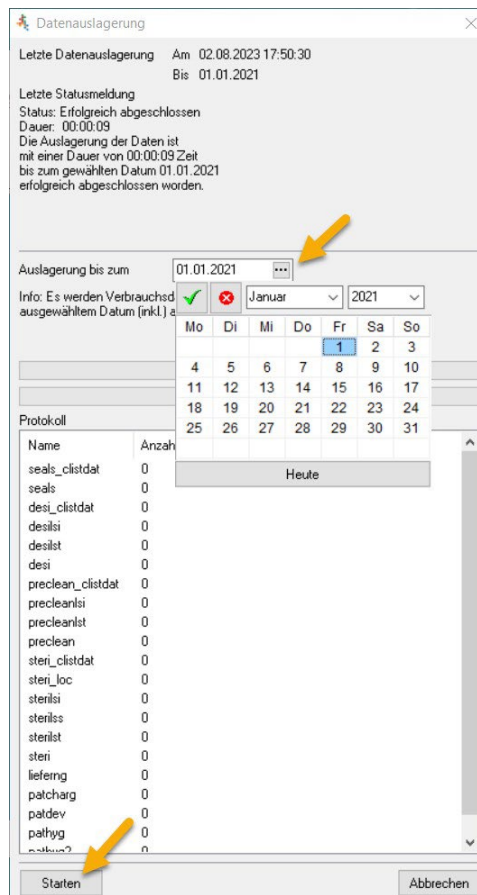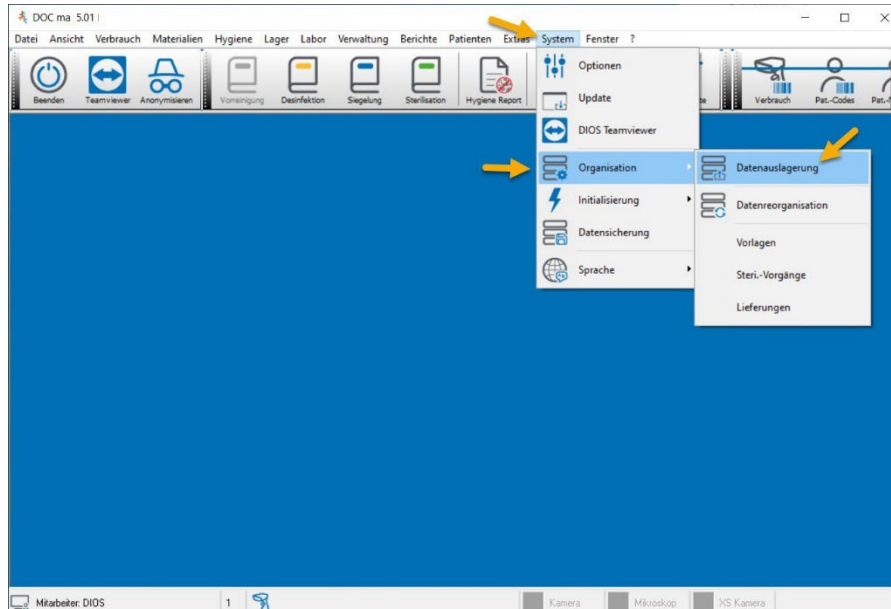

Nach Abschluss kann man sich jederzeit die ausgelagerten Daten anzeigen lassen.

In diesem Modus können keine neuen Daten erfasst werden. In der Menüleiste erscheint hierzu ein Hinweis. Um den Modus wieder zu verlassen, klicken Sie erneut auf Daten-Anzeige→Ausgelagerte

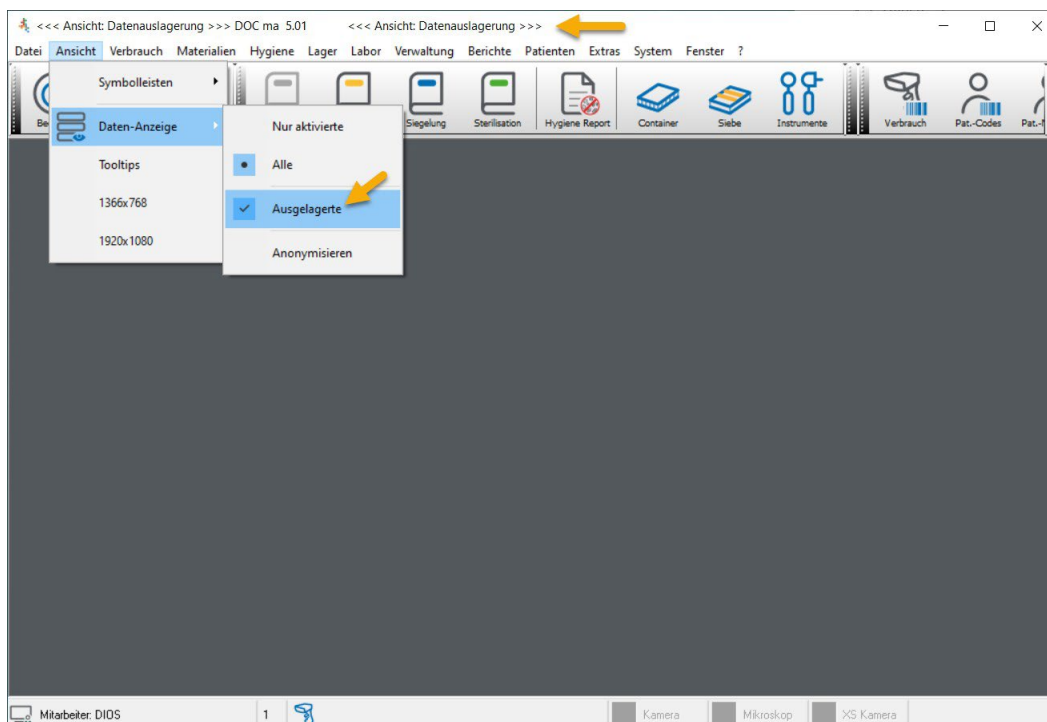


Im Anschluss können Sie DOCma® wieder ganz normal benutzen.

DOCma Version 5.01 -Changelog

2. Lock-Mechanismus während dem Update / Datenauslagerung / Reorganisation

Möchte ein Mitarbeiter an einer Station einen Prozess, wie beispielsweise das Update, die neue Datenauslagerung oder eine Reorganisation durchführen, so musste immer sichergestellt werden, dass die Software an allen weiteren Stationen geschlossen wurde und keine weitere Station DOCma® während dem Prozess öffnen. Mit dem neuen Lock- Mechanismus wird beim Start z. B. des Updates ein Lock gesetzt und andere Stationen können die Software während dem Prozess nicht starten und erhalten ein Hinweisfenster.



Bitte beachten Sie, dass vor dem Prozess dennoch alle weiteren Stationen die Software schließen müssen.

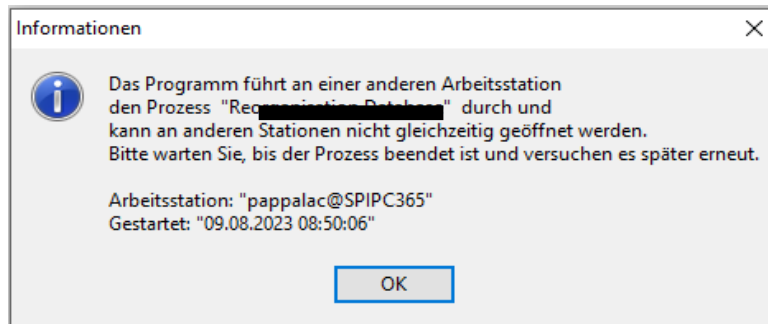

3. Namensanpassung Lieferant zu Standard-Lieferant

Im Produktreport werden die Lieferanten aufgelistet. Diese sind jedoch die Standard- Lieferanten, sodass es bei manchen Kunden zu Verwirrung gekommen ist. Die Bezeichnung


„Lieferant“ wurde in „Std.-Lieferant“ umbenannt.

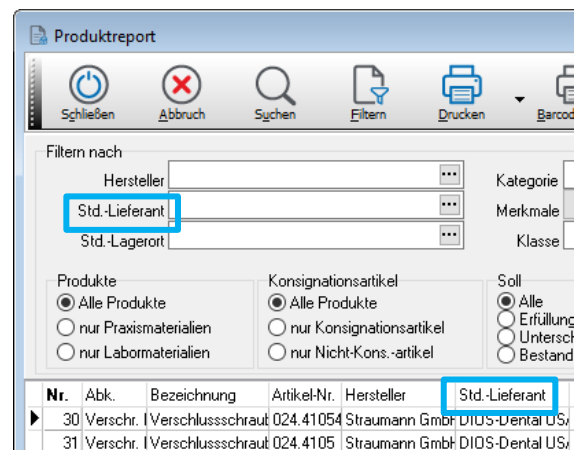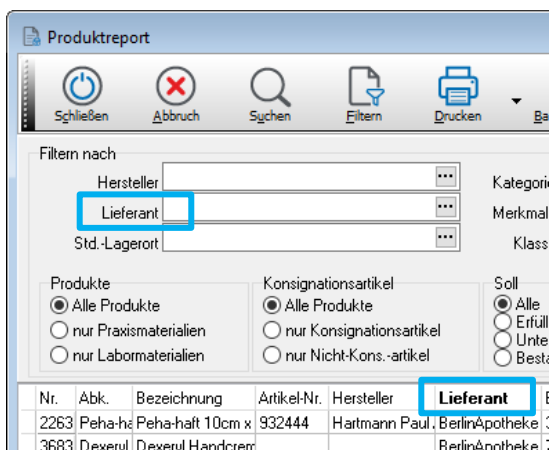

DOCma Version 5.01 -Changelog

4. Produktreport: Sortierung nach Nr.

Die Sortierung im Produktreport wurde angepasst. Die Sortierung findet nun automatisch nach der „Nr.“ statt. Sollten Sie eine andere Sortierung wünschen, so klicken Sie auf die gewünschte Kategorie, wie z. B. Abk. oder Bezeichnung

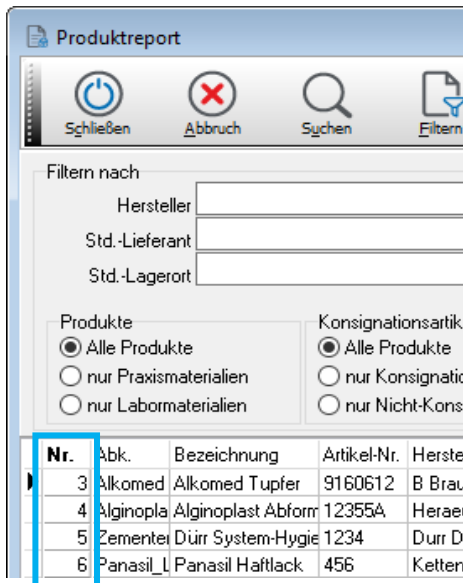

5. Produktreport: Doppelklick auf Produkt öffnet das Produkt in der Produktverwaltung

Eine weitere Anpassung in dem Produktreport ist diese, dass nun mit Doppelklick auf ein Produkt die dazugehörige Produktverwaltung geöffnet wird.

6. Spracheinstellung RU deaktiviert

Die Übersetzung für die Spracheinstellung wurde vorerst deaktiviert und ist nicht mehr auswählbar.



7. Icon Lagerbestände und Packlisten ausgeblendet

Unter dem Menüpunkt Lager wurde bisher Lagerbestände und Packlisten angezeigt, die jedoch immer grau hinterlegt und nicht auswählbar waren. Diese beiden Punkte sind noch nicht verfügbar, daher werden diese vorerst ausgeblendet.

DOCma Version 5.01 -Changelog


8.Überarbeitung der Module Datenreorganisation und Update Datenreorganisation:

Das Modul Datenreorganisation wurde codetechnisch überarbeitet. Die neue Version erkennen Sie an der Versionsnummer „V 6.0.0.0“ oben links im Fenster. Mit der überarbeiteten Datenreorganisation haben Sie nun die Möglichkeit in die Reorganisation „inklusive Auslagerungstabellen“ auszuwählen.

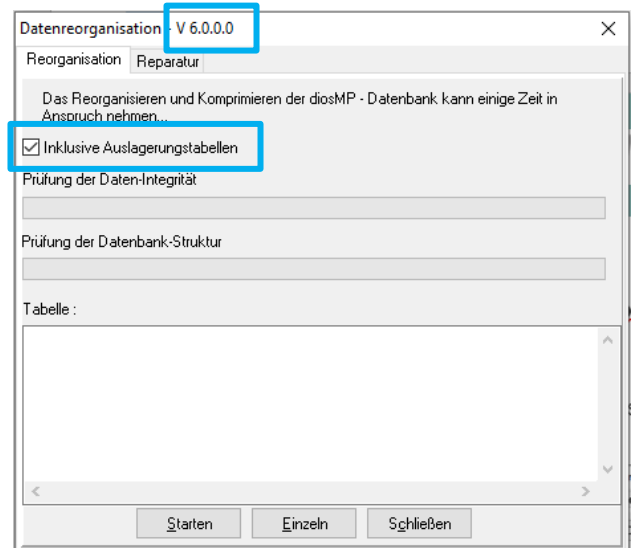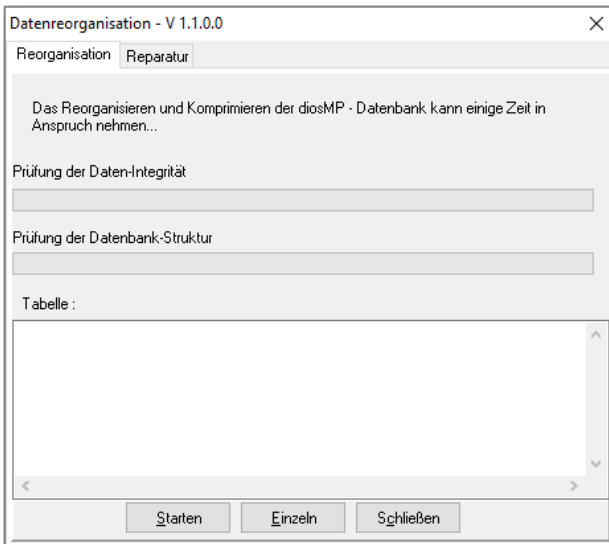


Bisher wurden bei Durchführung eines Updates die notwendigen Schritte, wie der Download der Updatedatei, die Extraktion, eine Datenintegritätsprüfung und anschließend die eigentliche Installation aufeinanderfolgende Schritte automatisiert gestartet. Mit der Überarbeitung des Moduls „Update“ werden alle notwendigen Updateschritte in einem Vorgang erledigt

Mit Klick auf „Download + Start“ wird für die unterschiedlichen Schritte nur noch ein Fenster angezeigt.

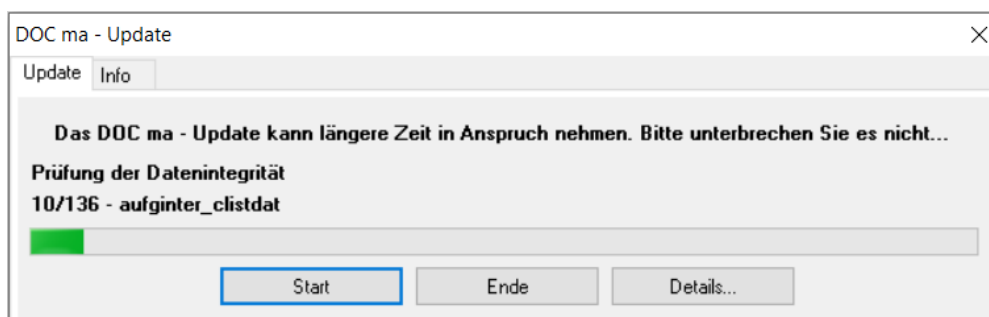

9. Deaktivierung von Log Dateien

In DOCma® Touch – Version werden standardmäßig Log-Dateien geschrieben. Diese sind relevant, um einen Fehlerfall nachvollziehen zu können und ob beispielsweise das Gerät tatsächlich gestartet ist. Das Schreiben der Log-Dateien kann dazu führen, dass DOCma® Touch verlangsamt wird. Sie haben nun die Möglichkeit das Schreiben der Log-Dateien in den Optionen zu deaktivieren.

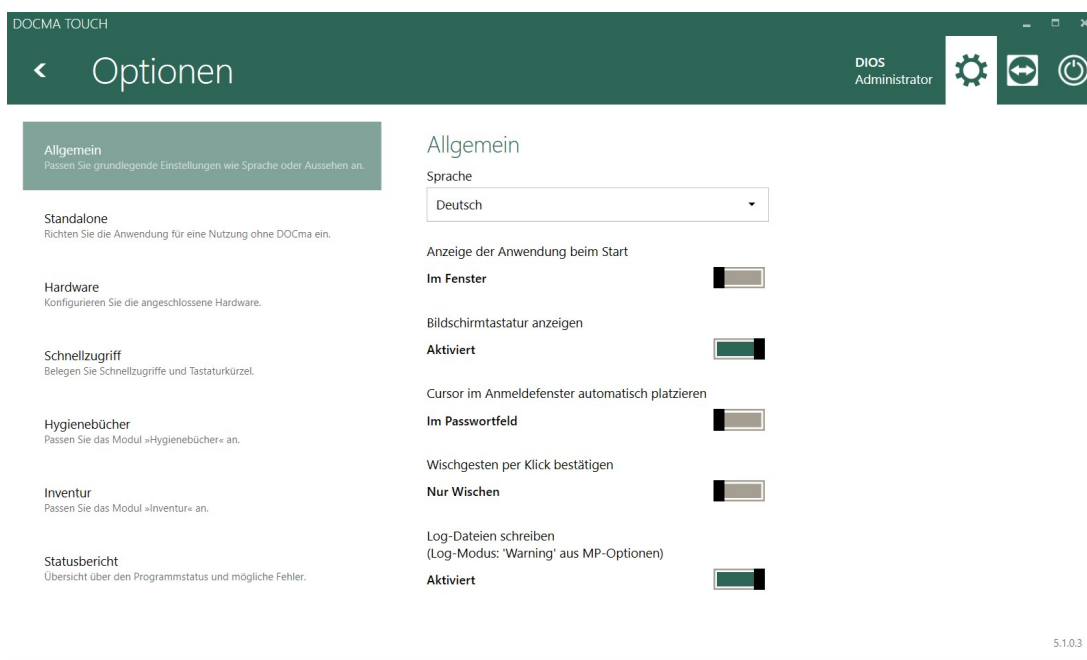

Bugfixes

1. Anzeige des Benutzers bei Änderung der Spracheinstellung
2. Anzeige abgeschlossener Laboraufträge
3. Exception Fehlermeldung bei Zugriff Sterilisation oder Desinfektion im Hygienereport
4. Unvollständige Übersetzung in Systemoptionen
5. Warnung zur Duplizierung bei Einweisung ohne Wiederkehr
6. Darstellung im Barcode-Druck